


Inkids 간편가이드

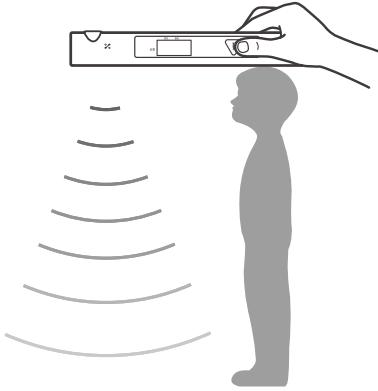

- 본 제품은 초음파를 이용해 키를 간편하게 잴 수 있는 기기입니다.
- 본 제품 사용 전에는 반드시 간편가이드를 읽어주시기 바랍니다.

(주)인바디

고객지원: 080-578-3939 Website: <https://www.inbody.com>


3. InKids 사용

- 1) 버튼을 눌러 전원을 켜세요.
대기온도와 습도를 확인합니다.



- 2) 버튼을 한번 더 누르면 측정 화면으로 넘어갑니다. InKids의 초음파 센서에서 발생한 신호가 바닥까지의 거리를 측정합니다. 공기를 통해 전달되는 초음파는 옆으로 퍼져 나가는 특성이 있으므로, 측정 장소 가까이에 장난감 등이 없도록 주변을 잘 정돈해주세요.


※신호 전달이 방해되지 않도록 팔자세는 차렷 자세를 유지합니다.

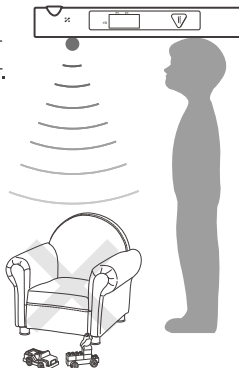

1. 제품 구성


InKids의 제품 구성은 다음과 같습니다.
각 구성품이 모두 있는지 확인하세요.

- ① InKids
- ② 건전지 AAA Type(1.5V) × 4EA
- ③ 간편가이드

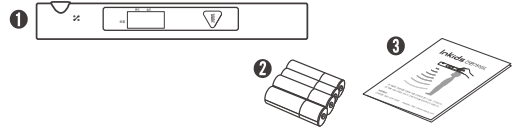


2. 외관 및 부분 명칭


InKids 각 부분의 명칭은 다음과 같습니다.

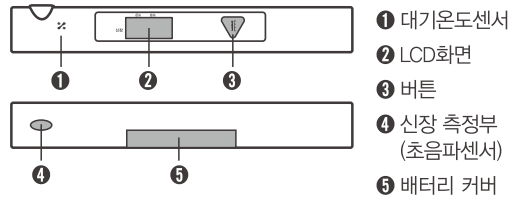

- 3) '머리 올려 놓는 위치'를 신장계 끝에 맞춰주세요. 기울어지더라도 '머리 올려 놓는 위치'를 기준으로 신장을 측정합니다. 좌우, 앞뒤 방향으로 수평을 맞추어 'PUSH'가 화면에 표시되는지 확인하세요.

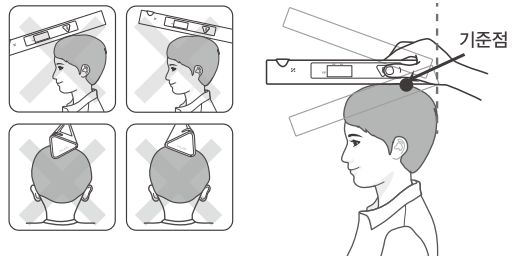

- 4) 버튼을 눌러 측정하며, 수평바가 중앙에 나타났을 때 버튼을 누르면 다시 측정할 수 있습니다.

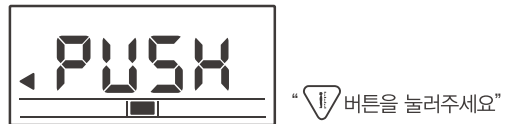

※ 3초간 버튼을 누르거나, 20초간 가만히 놓아두면 전원이 자동으로 꺼집니다

4. 오류 메시지

사용도중 발생하는 이상현상에 대해서 아래의 오류 메시지가 LCD화면에 나타납니다.



수평이 맞지 않습니다.

※ 오류 메시지가 나타난 후에 수평이 맞춰지면 다시 'PUSH'가 표시됩니다.



E999
초음파신호가 감지되지 않습니다. 바닥에 카페트나 이불이 있지 않은지, 주변에 음파가 잘 반사되는 물체가 있지 않은지 확인하세요.



E000
신장 측정부(초음파센서)가 머리카락에 가려지지 않도록 하여 측정하세요.



E050
50,0cm 미만일 경우 측정이 안됩니다. 가까이에 장애물이 있는지 확인하세요.



E200
200,0cm 이상일 경우 측정이 안됩니다.




bAtt
배터리가 부족할 경우 화면에 배터리 아이콘이 표시되며, 측정이 불가능한 경우 'bAtt'가 표시된 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

- 떨어뜨리거나 초음파센서 쪽에 무리한 힘을 가하면 파손될 수 있으니 주의해주세요.
- 갑자기 더운 곳으로 이동하거나 에어컨 가까이에서 키를 측정하지 않도록 주의해주세요. 초음파는 대기 온도에 따라서 속도가 변하므로 대기 온도가 일정하게 유지되는 장소에서 키를 측정하세요.
- 카페트나 이불 위에서 측정하면 신호가 흡수되어 키가 정상적으로 측정되지 않을 수 있습니다.
- 본 제품에 사용된 초음파센서는 약 30도 밖으로 퍼지는 성질이 있습니다. 가까이에 음파가 반사되는 물체가 있는 경우 키가 정확하게 측정되지 않습니다. 주변을 잘 정돈해주세요.
- 물이 들어가지 않도록 주의해주세요.
- 침수피해나 임의로 제품을 분해한 경우, 당사의 무상 보증 서비스를 받을 수 없습니다.
- 본 제품은 구입일로부터 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다. 고객 과실로 인한 파손 및 고장은 무상 보증 서비스에서 제외됩니다.

7. 건전지 교체 시 주의사항

- 건전지의 +, - 극성을 확인하여 정확히 넣어 주십시오. 건전지 역 삽입 시 누액이나 파열이 발생할 수 있습니다.

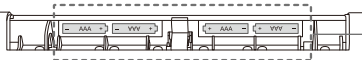


서로 다른
방향으로 삽입


- 새로운 건전지와 사용한 건전지를 함께 사용하지 마십시오. 건전지 교체 시 같은 회사, 같은 모델의 AAA사이즈 건전지 4개를 한꺼번에 교체 하십시오.
- AAA사이즈의 알카라인 건전지 또는 망간 건전지를 사용하여 주십시오.
- 젖은 손으로 건전지를 끼우지 마십시오.

5. 앱 다운로드 방법

InKids는 스마트폰을 이용하여 아이의 성장을 간편하게 관리할 수 있습니다.
구글 플레이스토어 또는 앱 스토어에서 '인키즈' 앱을 다운로드 받으세요.

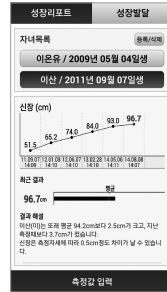

측정 결과를 입력하세요.

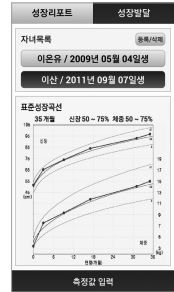

신장의 변화를 한눈에 관리하세요.

* 인키즈 앱은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

6. 사용시 주의사항

- 1) 아이들이 던지거나 떨어뜨리면 다칠 수 있으니 아이들 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 5) 장기간 사용하지 않는 경우 건전지를 빼서 보관하십시오.
- 6) 사용한 건전지는 지정된 장소에 폐기하십시오.
- 7) 잘못된 건전지 사용은 제품의 성능을 떨어뜨리거나, 제품을 손상시켜 화재의 원인이 될 수 있습니다.

8. 제품사양

기재재명칭	포터블 신장계
모델명	InLabS50
측정항목	신장, 실내온도, 습도
신장측정범위	50,0cm ~ 200,0cm
신장측정정확도	±0.5cm
기타측정범위	실내온도: 16~40℃ (±1℃) / 습도: 30~80% (±7%)
측정 시간	1초 (최대 7초)
센서	초음파센서, 온도센서, 습도센서
소비전류	100mA 이하
소비전원	DC 3V (1.5V AAA건전지 4EA)
표시화면	LCD
색상	Green, Pink, Blue, Gray
크기	43(W) × 44(L) × 300(H) : mm
무게	238g
동작환경	16 ~ 40℃, 30 ~ 80%RH
보관환경	-10 ~ 70℃

* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



등록번호: MSIP-REM-BIB-InLabS50
기재재명칭: 포터블 신장계
모델명: InLabS50
상호명: ㈜인바디
제조사/제조국가: (주)인바디/대한민국