


InBody370 프린터 호환리스트

InBody370 Version을 확인해야 합니다.


1. Version 확인하는 방법

A. 화면 1

- i. 대기화면에서 퀵셋업을 눌러 환경설정 화면으로 이동함.

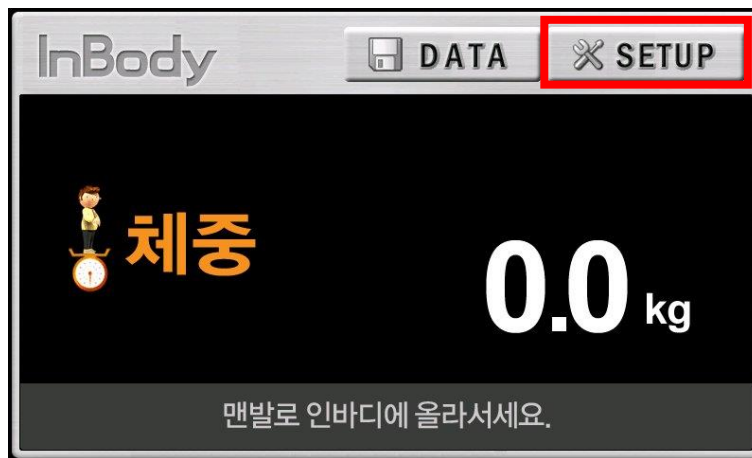

- ii. SET UP 을 5 번 연속 터치함.

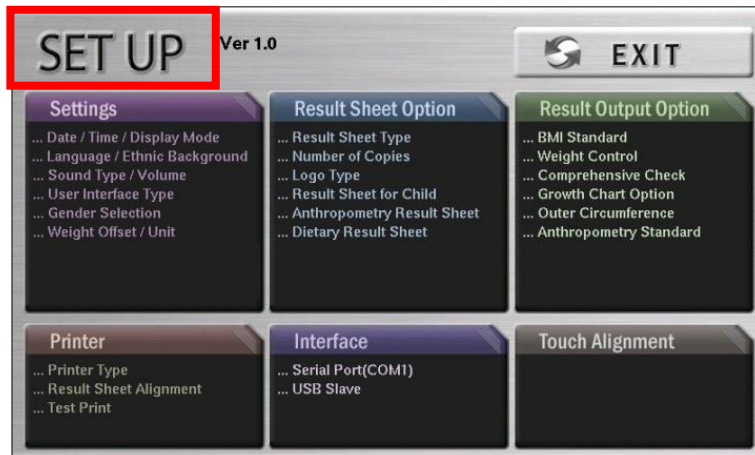

- iii. S/W VERSION 확인 : 370DM-XXXX



B. 화면 2


- i. 장비에서 퀵셋업 버튼 누름.




- ii. Setup 화면 왼쪽 하단의 Setup 버튼 누름.



- iii. SET UP 을 5 번 연속 터치함.

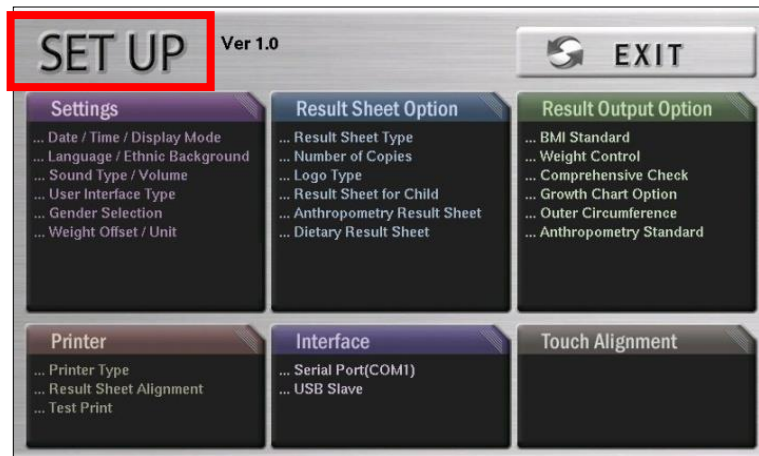

iv. S/W Version 을 확인 : 370DM-XXXX

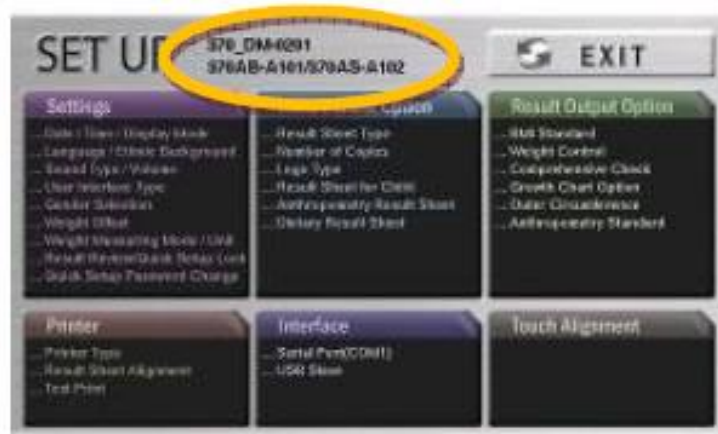

2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [370DM-0201 ~ 370DM-0302 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [370DM-0401 ~ 370DM-0402 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [370DM-0502 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. 370DM-0201 ~ 370DM-0302 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고	
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB		
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB		
삼성	ML-2570	Laser	PCL6	USB	단종	
	ML-2571N		PCL6	USB	단종	
	ML-1640K		SPL	USB	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	
	ML-1910K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	SPL2009
Lexmark	ML-1865WK		SPL, PCL5e	USB	단종	SPL2009
	E120	Laser	SPL	USB	단종	
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB		
	MS310D		PCL5e/PCL6(SPL)	USB		
	MS312DN		PCL5e/PCL6(SPL)	USB		

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. 370DM-0401~370DM-0402 Version 이후 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고	
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB		
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB		
삼성	ML-2570	Laser	PCL6	USB	단종	
	ML-2571N		PCL6	USB	단종	
	ML-1640K		SPL	USB	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	
	ML-1910K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종	SPL2009

	ML-2525K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	SPL2009
	ML-1865WK		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2540		SPL,	USB		SPL2011
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종	
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB		
	MS310D		PCL5e/PCL6(SPL)	USB		
	MS312DN		PCL5e/PCL6(SPL)	USB		

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. 370DM-0502 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고	
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB		
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB		
삼성	ML-2570	Laser	PCL6	USB	단종	
	ML-2571N		PCL6	USB	단종	
	ML-1640K		SPL	USB	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	
	ML-1865WK		SPL, PCL5e	USB	단종	
	ML-1910K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	SPL2009
	ML-2540		SPL,	USB		SPL2011
	ML-2165W/ML-2168W		SPL	USB		SPL2009-600
	SL-M2620		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-3310D		SPL, PCL5e	USB		SPL2009-600
	ML-2164		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2165/ML-		SPL, PCL5e	USB		SPL2009-

	2168				600
	SL-M2620ND		SPL	USB	SPL2009-600
	SL-M2028		SPL	USB	단종 SPL2009-600
	SL-M2029		SPL	USB	SPL2009-600
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	MS310D		PCL5e/PCL6(SPL)	USB	PCL
	MS312DN		PCL5e/PCL6(SPL)	USB	PCL

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.