

# InBody4.0 프린터 호환리스트

InBody4.0 Version을 확인해야 합니다.

## 1. Version 확인하는 방법

### A. 대기화면에서 Setup 버튼 누름.

1 지역설정 : 날짜 변경 :  
시간변경 :  
표시형식 : ☐ yy/mm/dd ☐ mm/dd/yy ☐ dd/mm/yy  
인종선택 : ☐ Asian ☐ Caucasian ☐ Others

2 프린터 : 종류설정 : ☐ PCL3 ☐ HP ☐ Canon ☐ Epson ☐ Lexmark  
결과지 좌표조정 : X - Y -  
시험인쇄 :  
결과지 출력 : ☐ 1장 (1-1) ☐ 1장 (1-2) ☐ 2장  
결과지 출력횟수 : ☐ 0회 ☐ 1회 ☐ 2회

3 미디어설정 : 화면 밝기 조정  
사운드 크기 조정

4 네트워크설정 : MANUAL : DNS :  
Netmask :  
Gateway :  
IP :  
DHCP : ☐ on ☐ off

5 기타설정 : 체중 측정 : ☐ Enable ☐ Disable  
체중 조정 : 0.0 kg  
History 초기화 :  
버전

6 외부기기설정 : Printer : ☐ Enable ☐ Disable  
Lookin'Body : ☐ Enable ☐ Disable  
Stadiometer : ☐ Enable ☐ Disable  
Blood Pressure : ☐ Enable ☐ Disable

### B. 5.기타설정으로 이동하여 마지막 항목의 버전을 확인함.

5 기타설정 : 체중 측정 : ☒ Enable ☐ Disable  
체중 조정 : 0.0 kg  
측정 모드 : ☒ 진료용 ☐ 연구용  
History 초기화 : Data exists  
버전 : IB40-02-04GH/10AM-00-02/40AP-S0-03

### C. 마지막 항목 Others 로 이동

### D. 마지막 항목 Version 으로 이동

### E. Version 을 확인 : 4.0DM-XXXX

2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [IB40DM-0101 ~ IB40DM-0102 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)  
 B. [IB40DM-0103 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. IB40DM-0101 ~ IB40DM-0102 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
삼성	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
Lexmark	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. IB40DM-0103 이후 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.