


# InBody330 프린터 호환리스트

InBody330 Version을 확인해야 합니다.

## 1. Version 확인하는 방법

### A. 화면 1


- i. 대기화면에서 콕셋업부분을 5 초이상 길게 누르면 환경설정 화면으로 이동함.

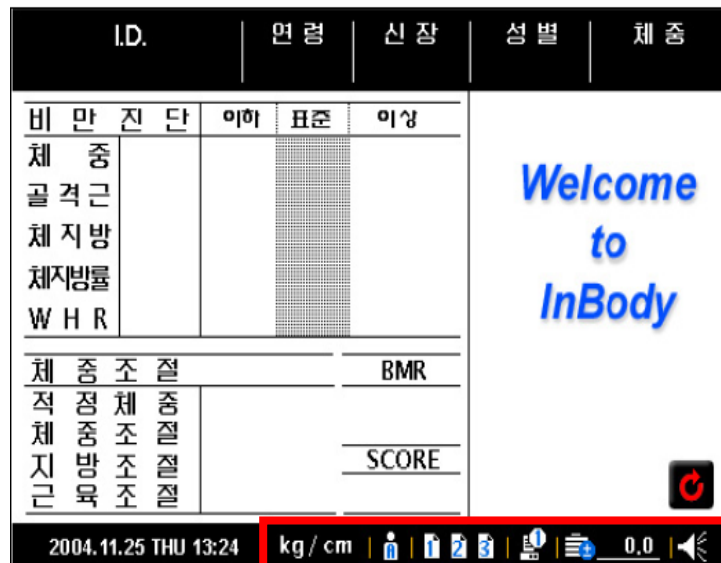

콕셋업 :



- ii. SETUP 에서 Others 로 이동.

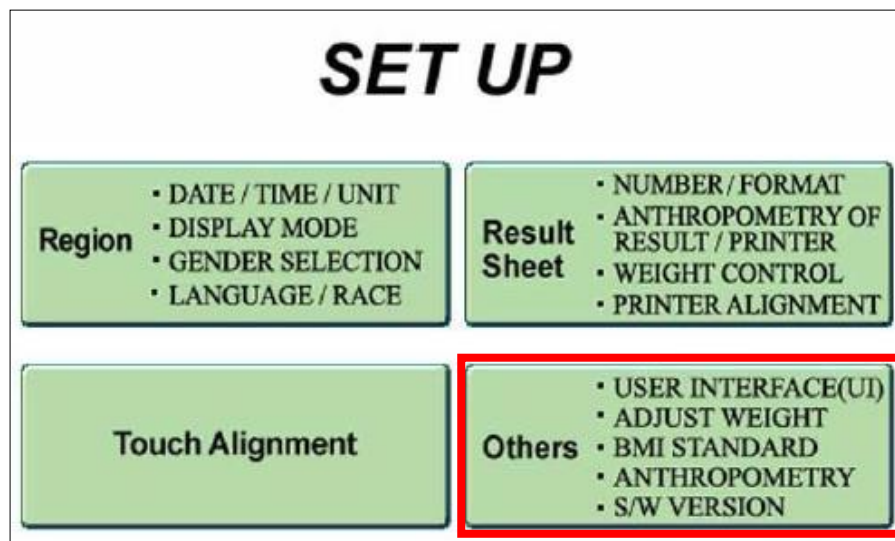

- iii. S/W VERSION 확인 : 330DM-01-01 또는 330DMN-XXXX


Others		
USER INTERFACE (UI)		
Easy Type		Professional Type
ADJUST WEIGHT	BMI STANDARD	ANTHROPOMETRY
0.0 kg	Asian	Average
S/W VERSION		
Main prog.	330 DM-0210B	Sub prog. UBAB-01-01
	330 DP-06KKE	UBAA-03-05
<input type="button" value="Enter"/>		

2. 화면 2


- i. 장비에서 퀵셋업 버튼 누름.




- ii. Setup 화면 오른쪽 하단의 Setup 버튼 누름.

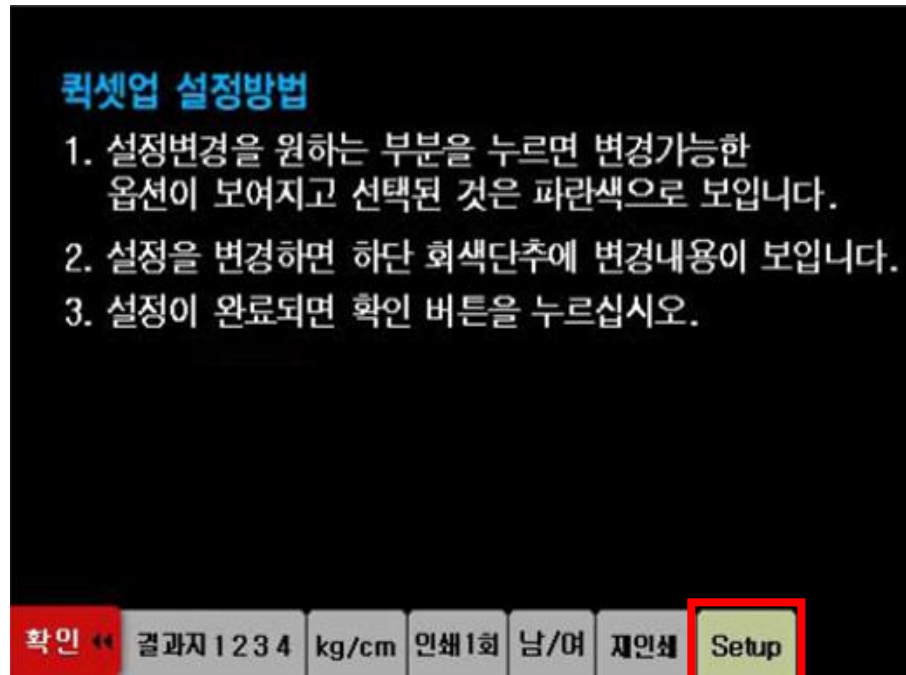

- iii. SETUP 의 Others 로 이동

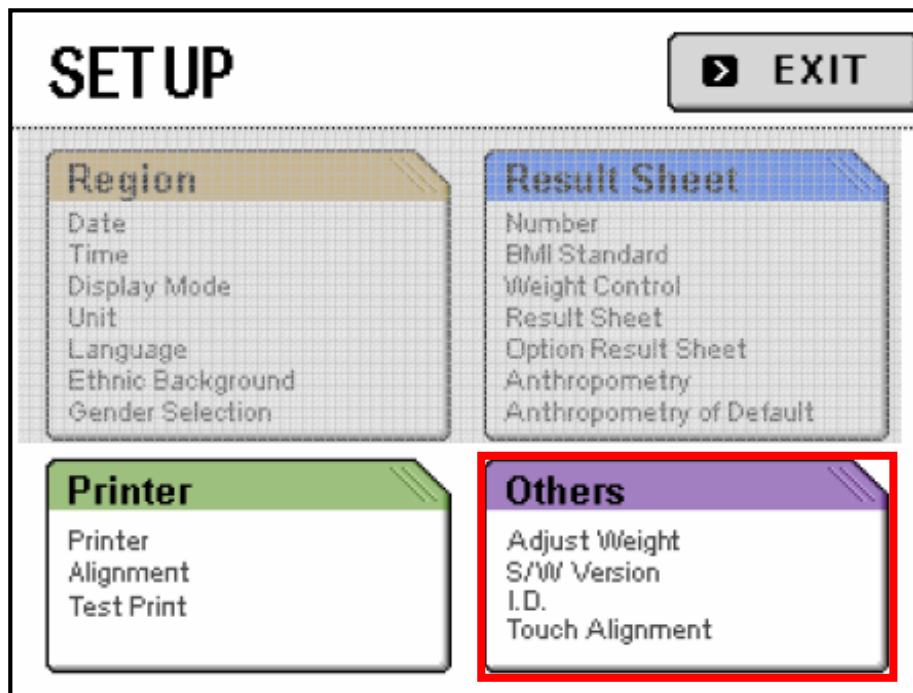

- iv. S/W Version 을 확인

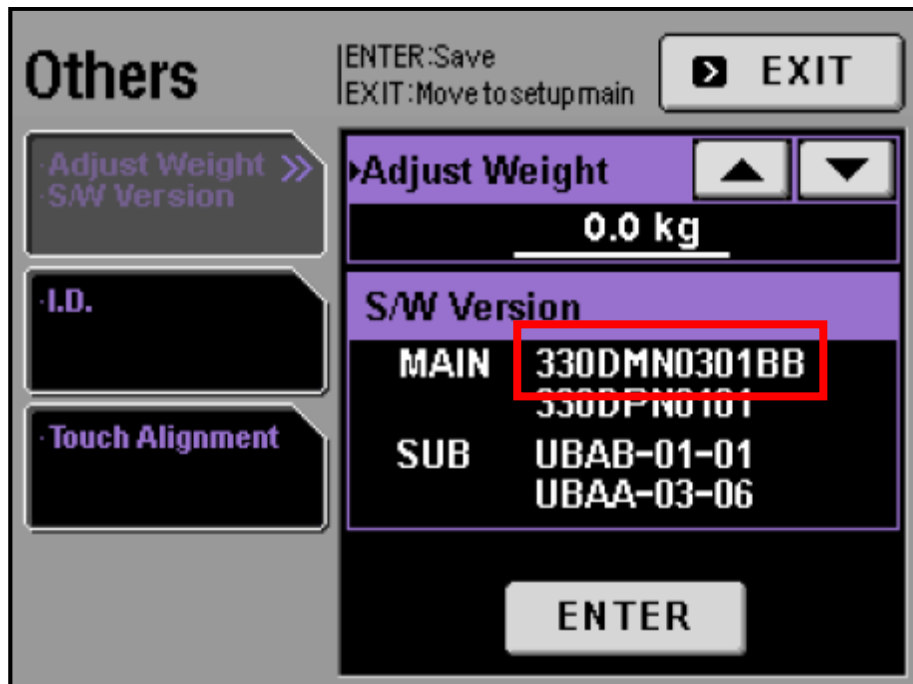

3. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [330DM-0101 ~ 330DM-0209 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [330DM-0210 ~ 330DM-0212 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [330DM-0213 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- D. [330DMN0301 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- E. [330DMN0302 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

4. 330DM-0101 ~ 330DM-0209 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	<b>HL-2250DN</b>	<b>Laser</b>	<b>PCL6</b>	<b>USB</b>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. 330DM-0210 ~ 330DM-0212 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	<b>HL-2250DN</b>	<b>Laser</b>	<b>PCL6</b>	<b>USB</b>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		PCL3	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종
	ML-2851DK		SPL	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

6. 330DM-0213 이후 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	<b>HL-2250DN</b>	<b>Laser</b>	<b>PCL6</b>	<b>USB</b>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		PCL3	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종
	ML-2851DK		SPL	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-1910K		SPL	USB	단종
	ML-1916K		SPL	USB	단종
	ML-2525K		SPL	USB	단종
	ML-2580NK		SPL	USB	단종
	<b>ML-1865WK</b>		<b>SPL</b>	<b>USB</b>	단종 <b>SPL2009</b>
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

7. 330DMN0301 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	<b>HL-2250DN</b>	<b>Laser</b>	<b>PCL6</b>	<b>USB</b>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

8. 330DMN0302 이후 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	<b>HL-2250DN</b>	<b>Laser</b>	<b>PCL6</b>	<b>USB</b>	

삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종
	ML-1910K		SPL	USB	단종
	ML-1916K		SPL	USB	단종
	ML-2525K		SPL	USB	단종
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종
	<b>ML-1865WK</b>		<b>SPL2009, PCL</b>	<b>USB</b>	단종
	<b>ML-3310D</b>		<b>PCL5e</b>	<b>USB</b>	
					<b>PCL</b>
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.